



Gasfederhocker

*Hocker für physikalische
Therapie und Diagnose*

Model 51.2051
Model 51.2053

HWK Therapieliegen

Am Storrenacker 27
76139 Karlsruhe
Deutschland

Telefon +49 721 94605-11/17
Fax +49 721 94605-33

info@hwk-therapieliegen.de
www.hwk-therapieliegen.de

Ein Unternehmensbereich der
Hagsfelder Werkstätten
& Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH
Am Storrenacker 9-11
D-76139 Karlsruhe

Urheberrecht

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist von HWK urheberrechtlich geschützt und darf nur für interne Zwecke reproduziert werden. Jede weitere Reproduktion des Materials, sowohl im Ganzen als auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von HWK nicht gestattet.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|---|---|
| 1. | Vorwort | 4 |
| 2. | Der HWK Gasfederhocker | 4 |
| 3. | Weitere Produktinformationen | 4 |
| 3.1 | Produkteigenschaften | 4 |
| 4. | Anlieferung / Öffnen | 4 |
| 4.1 | Anlieferung | 4 |
| 4.2 | Öffnen | 5 |
| 5. | Gesetzliche Bestimmungen | 5 |
| 5.1 | Gewährleistung | 5 |
| 5.2 | Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 5 |
| 6. | Medizinprodukte-Betreiberverordnung | 5 |
| 7. | Warnhinweise..... | 5 |
| 8. | Montage/Aufbau..... | 6 |
| 9. | Bedienung | 6 |
| 10. | Fehlerbehebung..... | 6 |
| 10.1 | Der Hocker rollt nicht | 6 |
| 11. | Pflegehinweise..... | 7 |
| 12. | Technische Daten | 7 |

1. Vorwort

Herzlichen Dank, dass Sie sich für einen Gasfederhocker der HWK gGmbH - Therapieliegen entschieden haben.

Diese Gebrauchsanweisung enthält allgemeine Bedienungs-, Sicherheits-, Wartungs- und Pflegehinweise für Anwender und Betreiber der HWK Gasfederhocker.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch. Sie sind Voraussetzung für die lange Lebensdauer unseres Produktes, sowie für die sichere und erfolgreiche Nutzung des Gasfederhockers.

Die Anforderungen an Produkt und Therapie unterliegen einem ständigen Wandel, deshalb behalten wir uns technische und konstruktive Änderungen vor.

2. Der HWK Gasfederhocker

Designerleistung, Ingenieurwissen, Produktionserfahrung und der ständige Dialog mit Anwendern aus Klinik und Praxis führten zum HWK Gasfederhocker.

Für den Praxisalltag geschaffen, vereint er Patientenkomfort und Arbeitsergonomie mit den aktuellen Behandlungsanforderungen der Therapeutin und des Therapeuten.

Auch ein Hocker kann ein hochwertiger, ergonomischer Stuhl sein. Überall wo flexible, wendige Stühle benötigt werden und der Arbeitsalltag durch viel Bewegung gezeichnet ist, kommen unsere Gasfederhocker zum Einsatz:

Den Gasfederhocker gibt es in zwei unterschiedlichen Höhenverstellbereichen. Je nach Einsatzzweck kann der Hocker ergonomisch korrekt zusammengestellt werden.

3. Weitere Produktinformationen

3.1 Produkteigenschaften

- komfortabler, gepolsterter Rundsitz mit Kunstlederbezug
- verschiedene Gasfederlängen für Sitzhöhen von 44 bis 58,5 cm bzw. 58,5 bis 83 cm
- fünfarmiges stabiles Aluminiumfußkreuz
- Rollen gebremst oder ungebremst
- Baukastenprinzip zur individuellen Zusammenstellung des Hockers

4. Anlieferung / Öffnen

Ihr HWK Gasfederhocker wurde vor dem Versand sowohl in mechanischer, optischer als auch funktioneller Hinsicht sorgfältig überprüft und hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

4.1 Anlieferung

- Sendung auf Vollständigkeit prüfen (Stückzahl der Pakete)
- Verpackung auf Schäden prüfen

Sollten Fehlteile oder Mängel festgestellt werden (auch leichte Verpackungsschäden) müssen diese auf den Frachtpapieren vom anliefernden Spediteur vor Quittierung vermerkt werden. Informationen über Transportschäden sofort an die HWK-Therapieliegen weiterleiten.

4.2 Öffnen

Die Sendung muss sofort nach Erhalt auf eventuelle Schäden geprüft werden. Sollten Schäden festgestellt werden sind diese der HWK-Therapieliegen innerhalb von zwei Werktagen zu melden.

Bitte benutzen Sie hierfür beiliegendes Formular.

Nach Ablauf dieser Frist können keine Gewährleistungsansprüche aus Transportschäden mehr geltend gemacht werden.

5. Gesetzliche Bestimmungen

5.1 Gewährleistung

HWK gGmbH (HWK-Therapieliegen) bescheinigt, dass dieses Gerät frei von Material- und Bearbeitungsfehlern aus- geliefert wurde. Es wird versichert, dass das Gerät vor der Auslieferung bei einer Endkontrolle gründlich geprüft wurde und alle Funktionen einem Test unterzogen wurden.

Alle HWK-Hocker tragen das CE-Zeichen. Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre auf alle Produkte.

Teile, die sich innerhalb der angegebenen Frist als fehlerhaft erweisen, sind unverzüglich bei einem zuständigen HWK-Fachhändler oder bei der HWK gGmbH (HWK-Therapieliegen) zu melden.

Defekte Teile, resultierend aus einem Garantieaustausch, sind unverzüglich, nach vorheriger Absprache, an die HWK gGmbH (HWK-Therapieliegen) einzusenden, damit eine Schadensregulierung vorgenommen werden kann.

Eine weitergehende Gewährleistung bzw. Haftung, insbesondere für Folgeschäden und eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs, kann nicht übernommen werden.

5.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Einsatz durch sachkundige Benutzer aus physikalischer Therapie, Rehabilitation und angrenzenden Bereichen bestimmt. Der Hersteller gibt keine Garantie hinsichtlich der Eignung dieser Produkte für einen bestimmten therapeutischen und diagnostischen Zweck. Der Therapeut bestimmt den sinnvollen Gebrauch.

Dieses Medizinprodukt ist für den Betrieb innerhalb geschlossener Räume bei einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 35°C ausgelegt.

Zum Einsatz in Nassbereichen sind die Gasfederhocker nicht geeignet.

6. Medizinprodukte-Betreiberverordnung

Zum Errichten und Betreiben dieses Gasfederhockers muss im Allgemeinen die MPBetreibV beachtet werden.


7. Warnhinweise

- Der Gasfederhocker ist vor dem Zugriff durch unbefugte Personen zu schützen.
- Der Gasfederhocker darf nicht zweckentfremdet werden.



8. Montage/Aufbau

- Alle Teile auspacken
- Das Fußkreuz mit den Rädern nach unten auf den Boden stellen
- Die Gasfeder mit dem dicken Ende in die Mitte des Fußkreuzes einstecken
- Das Sitzpolster mit der vormontierten Gasfederaufnahme auf die Gasfeder stecken
- Richtigen Sitz der Bauteile überprüfen und nun den Hocker belasten, um die Gasfeder richtig einzupressen
- Beim Betätigen des Auslöserings muss der unbelastete Sitz nun nach oben fahren
- Der durch das Körpergewicht belastete Sitz muss nach Loslassen des Auslösehebels in der eingestellten Position verharren. Die eingestellte Sitzhöhe darf nicht absinken.

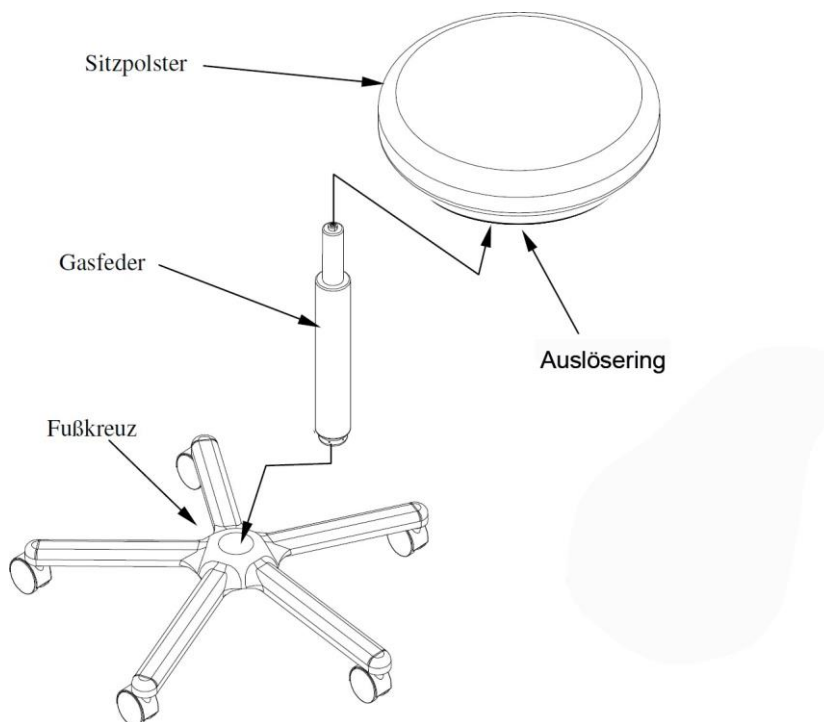

9. Bedienung

Zum Einstellen des Gasfederhockers den Hebel in der Sitzunterseite hochziehen. Wenn die richtige Höhe erreicht ist, den Hebel loslassen.

Die unbelastete Sitzfläche fährt nach oben. Nach Loslassen des Auslöserings muss die Sitzfläche bei Belastung mit dem Körpergewicht die eingestellte Position beibehalten.

Bei Betätigen des Auslöserings während dem Belasten der Sitzfläche senkt sich diese ab.

10. Fehlerbehebung

10.1 Der Hocker rollt nicht

- Überprüfen, ob an den Rollen die Feststellbremse, falls vorhanden, aktiviert ist.
- Arretierung lösen

11. Pflegehinweise

Regelmäßige und sorgfältige Pflege garantiert Ihnen lang anhaltende Freude an Ihrem hochwertigen Polsterbezug.

Geprüfte und empfohlene Polsterreinigungsmittel des Skai©-Herstellers können bei HWK-Therapieliegen angefragt werden.

12. Technische Daten

Material:

| | |
|-----------------------|--|
| Unterkonstruktion: | Aluminium-Fußkreuz poliert Durchmesser 605 mm |
| Modell 51.2051: | Stuhlsäule mit Gaslift, chrom. Hub/55mm mit Tiefenfederung, LGA geprüft, Klasse 4 Verstellbereich: min. 440 mm bis max. 585 mm MAX: zulässige Belastung: 150 kg |
| Modell 51.2053 | Gasfeder, chrom Verstellbereich: min. 585 mm bis 830 mm max. zulässige Belastung: 150 kg |
| Rollen (Standard): | Doppellenkrolle, universal, gebremst, Durchmesser 50 mm |
| Polster (Sitzfläche): | Kunstleder, Durchmesser 37 cm, ca. 6 cm hoch |