

GEBRAUCHSANWEISUNG



Standspiegel

Model 32.1121



HWK Therapieliegen

Am Storrenacker 27
76139 Karlsruhe
Deutschland

Telefon +49 721 94605-11/17
Fax +49 721 94605-33

info@hwk-therapieliegen.de
www.hwk-therapieliegen.de

Ein Unternehmensbereich der
Hagsfelder Werkstätten
& Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH
Am Storrenacker 9-11
D-76139 Karlsruhe

Urheberrecht

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist von HWK urheberrechtlich geschützt und darf nur für interne Zwecke reproduziert werden. Jede weitere Reproduktion des Materials, sowohl im Ganzen als auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von HWK nicht gestattet.

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	4
2.	Der HWK Standspiegel	4
3.	Weitere Produktinformationen	4
3.1	Produkteigenschaften.....	4
4.	Anlieferung / Öffnen / Montage	4
4.1	Anlieferung.....	4
4.2	Öffnen.....	5
4.3	Montage.....	5
5.	Gesetzliche Bestimmungen	5
5.1	Gewährleistung.....	5
5.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
6.	Warnhinweise	6
7.	Montage/Aufbau	6
8.	Bedienung	7
9.	Instandhaltung, Wartung und Pflege	7
10.	Technische Daten	7

1. Vorwort

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Standspiegel der HWK gGmbH (HWK-Therapieliegen) entschieden haben.

Diese Gebrauchsanweisung enthält allgemeine Bedienungs-, Sicherheits-, Wartungs- und Pflegehinweise für Anwender und Betreiber des Standspiegels.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch. Sie sind Voraussetzung für die lange Lebensdauer unseres Produktes, sowie für die sichere und erfolgreiche Nutzung des Standspiegels.

Die Anforderungen an Produkt und Therapie unterliegen einem ständigen Wandel, deshalb behalten wir uns technische und konstruktive Änderungen vor.

2. Der HWK Standspiegel

Designerleistung, Ingenieurwissen, Produktionserfahrung und der ständige Dialog mit Anwendern aus Klinik und Praxis führten zum HWK Standspiegel.

Für den Praxisalltag geschaffen, vereint er Patientenkomfort und Arbeitsergonomie mit den aktuellen Behandlungsanforderungen der Therapeutin und des Therapeuten.

Funktionalität auf hohem Qualitätsniveau bedeutet für Sie als Benutzer:

Keine offenen Wünsche bei den Einsatzmöglichkeiten üblicher und zukunftsweisender Methoden.

Hohe Verfügbarkeit ist durch das flächendeckende Service- und Beratungsnetz kompetenter HWK Händler und Stützpunkte sichergestellt.

3. Weitere Produktinformationen

3.1 Produkteigenschaften

- beschichtetes Stahlrohrgestell mit vier freilaufenden Rollen
- der Spiegel ist fest mit einer beschichteten Holzplatte verbunden
- der Neigungswinkel ist vertikal stufenlos im Bereich von 50° (-15° bis +35°) verstellbar
- ergonomisch durchdacht mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Patientenkomfort und Benutzerfreundlichkeit

4. Anlieferung / Öffnen / Montage

Ihr HWK Standspiegel wurde vor dem Versand sowohl in mechanischer, optischer als auch funktioneller Hinsicht sorgfältig überprüft und hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

4.1 Anlieferung

- Sendung auf Vollständigkeit prüfen (Stückzahl der Pakete)
- Verpackung auf Schäden prüfen

Sollten Fehlteile oder Mängel festgestellt werden (auch leichte Verpackungsschäden) müssen diese auf den Frachtpapieren vom anliefernden Spediteur vor Quittierung vermerkt werden. Informationen über Transportschäden sofort an die HWK-Therapieliegen weiterleiten.

4.2 Öffnen

Die Sendung muss sofort nach Erhalt auf eventuelle Schäden geprüft werden. Sollten Schäden festgestellt werden sind diese der HWK-Therapieliegen innerhalb von zwei Werktagen zu melden.

Bitte benutzen Sie hierfür beiliegendes Formular.

Nach Ablauf dieser Frist können keine Gewährleistungsansprüche aus Transportschäden mehr geltend gemacht werden.

4.3 Montage

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Montage beim Aufbau am Standspiegel auftreten, können keine Gewährleistungsansprüche daraus abgeleitet werden.

3. Gesetzliche Bestimmungen

5.1 Gewährleistung

HWK gGmbH (HWK-Therapieliegen) bescheinigt, dass dieses Gerät frei von Material- und Bearbeitungsfehlern aus- geliefert wurde. Es wird versichert, dass das Gerät vor der Auslieferung bei einer Endkontrolle gründlich geprüft wurde und sämtliche Funktionen einem Test unterzogen wurden.

Alle Modelle der HWK tragen das CE-Zeichen. Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre auf alle Produkte.

Teile, die sich innerhalb der angegebenen Frist als fehlerhaft erweisen, sind unverzüglich bei einem zuständigen HWK-Fachhändler oder bei der HWK gGmbH (HWK-Therapieliegen) zu melden.

Defekte Teile, resultierend aus einem Garantieaustausch, sind unverzüglich, nach vorheriger Absprache, an die HWK gGmbH (HWK-Therapieliegen) einzusenden, damit eine Schadensregulierung vorgenommen werden kann.

Eine weitergehende Gewährleistung bzw. Haftung, insbesondere für Folgeschäden und eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs, kann nicht übernommen werden.

5.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Einsatz durch sachkundige Benutzer aus physikalischer Therapie, Rehabilitation und angrenzenden Bereichen bestimmt. Der Hersteller gibt keine Garantie hinsichtlich der Eignung dieser Produkte für einen bestimmten therapeutischen und diagnostischen Zweck. Der Therapeut bestimmt den sinnvollen Gebrauch.

Dieses Medizinprodukt ist für den Betrieb innerhalb geschlossener Räume bei einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 35°C ausgelegt.

Ein Einsatz in Nassbereichen ist unzulässig und kann bei Nichtbeachten zu erheblichen Schäden führen und sowohl Patient als auch Anwender gefährden.

4. Warnhinweise

- Beim Verstellen der Spiegelflächenneigung niemals zwischen das Standrohr und das Spiegelbrett greifen (Quetschungsgefahr).
- Der Standspiegel ist vor dem Zugriff durch unbefugte Personen zu schützen.
- Der Standspiegel darf nicht zweckentfremdet werden.




5. Montage/Aufbau

- Den Karton der Spiegelverpackung vorsichtig öffnen, das Spiegelbrett zum Schutz der Spiegelfläche in der mitgelieferten Kartonverpackung mit der Spiegelseite nach unten, auf eine ebene Fläche legen.

- Den Klemmhebel (Pos. 4) lösen.


- Das komplett vormontierte Standrohr (Pos. 3) mit den beiden Kunststofflagerböcken und dem Querrohr mit Klemmhebel so auf die Rückseite auflegen, dass das Standrohr (Pos. 3) in Richtung Spiegelunterseite zeigt (das HWK-Logo befindet sich immer an der rechten unteren Ecke der Spiegelfläche) und die Anlageflächen der Lagerböcke ganz auf der Fläche des Spiegelbrettes durch Anheben des Standrohres flach aufliegen. Danach die Befestigungsbohrungen der Lagerböcke mit den Befestigungsgewinden (2 Stück/Seite) am Spiegelbrett deckungsgleich ausrichten und die 4 mitgelieferten Befestigungsschrauben mit den 4 Unterlegscheiben in den Befestigungsgewinden vorsichtig ansetzen und festschrauben. Dabei bitte beachten, dass die Schrauben gefühlvoll festgezogen werden.

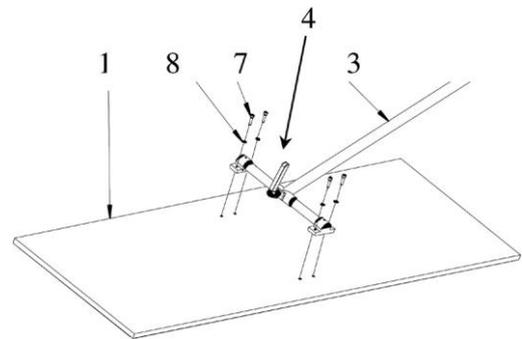

Achtung!

Schräg angesetzte Befestigungsschrauben in den Gewinden verursachen unweigerlich einen irreparablen Schaden des kompletten Spiegelbrettes.


- Danach das Fußteil (Pos. 2) entsprechend der Skizze am Standrohr (Pos. 3) an der halbrunden Ausfräsung mit einem Ringschlüssel SW13 festschrauben.

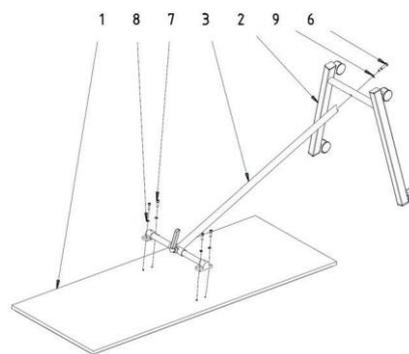

- Alle 4 Befestigungsschrauben an den beiden Lagerböcken und die Befestigungsschraube der Standrohrbefestigung noch einmal auf festen Sitz überprüfen und dann den fertig montierten Standspiegel mit den Rollen auf den Boden stellen.

Achtung: Durch die noch lose vertikal neigbare Spiegelfläche kann dabei eine Quetschgefahr entstehen.

- Jetzt kann individuell die Neigung der Spiegelfläche eingestellt werden. Zum Fixieren der eingestellten Spiegelposition, den Klemmhebel (Pos. 4) festziehen. Sollte keine ausreichende Klemmung erzielt werden, kann die Hebelwirkung des Klemmhebels verändert werden, indem man den Hebel anhebt, in die gewünschte Richtung dreht und danach wieder einrastet.

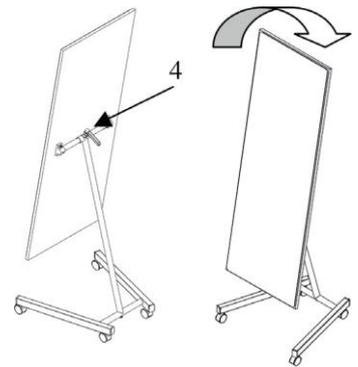

6. Bedienung

Zum Einstellen der Spiegelflächenneigung den Klemmhebel an der Spiegelrückseite lösen, die Neigung zwischen -15° und $+35^\circ$ einstellen und den Klemmhebel wieder festziehen. Sollte die Klemmhebelposition stören, kann diese leicht verstellt werden. Der Hebel muss dazu durch Ziehen in Richtung der Schraubenachse und anschließendem Drehen in eine nicht störende Position gebracht und dann wieder losgelassen werden, damit der Hebel in die Rasterung einrasten kann.

7. Instandhaltung, Wartung und Pflege

Eine besondere Wartung ist bei diesem Produkt nicht notwendig. Kontrollieren Sie jedoch in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 6 Monate) Ihren Standspiegel auf mechanische Unversehrtheit wie z.B. lockere Schraubverbindungen. Es ist darauf zu achten, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in die Gelenkstelle an der Spiegelrückseite eindringt.

8. Technische Daten

Gesamthöhe	180 cm
Fußbreite	58 cm
Fußtiefe	55 cm
Gesamtgewicht	22 kg
Spiegelfläche	500 x 1430 mm
Trägerbrett	510 x 1495 mm
Spiegelflächenverstellbereich des Neigungswinkels	50°
Verstellbereich aus der Vertikalen	von -15° bis 35°